

zoundream

Felicidades por recibir tu BabyT!

Este smartphone está dedicado a ejecutar la aplicación Baby Translator y requiere una conexión a internet estable a través de wifi para conectarse al servicio en la nube de Zoundream, impulsado por AMSI.

Coloca el dispositivo **horizontalmente** en el soporte tal como se muestra en la foto a la derecha. La **puerta de carga USB está en el lado derecho**.

El dispositivo se puede usar unas horas sin estar conectado a la alimentación, pero siempre manténlo dentro del alcance de tu Wi-Fi.

El paquete que recibirás contiene:

1. Un soporte para teléfono móvil.
2. El dispositivo android (Nokia o Alcatel).
3. Un cargador Usb + cable Usb-c.



Encender el dispositivo ①

Enciende el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 4 segundos. El botón de encendido se encuentra en la parte superior del dispositivo, el segundo por la derecha (🔴). El botón de la izquierda, que suele utilizarse para ajustar el volumen en la mayoría de los smartphones, controla el brillo del monitor (🟢).



Selecciona tu Wi-Fi de la lista, introduce tu contraseña Wifi y conéctate. ②

Una vez cargado el sistema, aparecerá la página de inicio de sesión como se muestra en la foto. Para conectarse al WiFi, pulsa el botón de **Wifi settings** en la esquina superior izquierda,

selecciona tu red de la lista, introduce tu contraseña y conéctate. Funciona igual que la conexión de un smartphone Android. Si tienes éxito, el icono cambiará a **Connected**



Espera. Tu dispositivo descargará la última versión del sistema, si está disponible, pasados unos minutos. ③

Nota: Tras conectarse correctamente a la red WiFi, espera unos minutos para que el dispositivo descargue automáticamente la última versión del sistema babyT. El monitor puede parpadear brevemente durante este proceso y el sistema se volverá a cargar. Una vez completado, puedes crear tu cuenta.



Introduce los datos de tu cuenta en la pantalla de login. ④

En la caja del dispositivo encuentras un usuario y una contraseñas ya listas, Solo tendrás que reellenar la pantalla de login y pulsar "Continue".


Todo a punto, ¡listo para empezar!

- Es **IMPORTANTE** que tengas en cuenta que debes utilizar siempre el **mismo nombre de usuario** y evitar crear uno nuevo a menos que se te indique.
- Si te desconectas de tu dispositivo, puedes volver a conectarte con tus **credenciales actuales**.
- Si olvidas tu contraseña, contactanos!

zoundream

Lo que hay que saber sobre el BabyT

Si funciona correctamente, el dispositivo mostrará una **pantalla principal** similar a la que se muestra en la imagen adjunta.

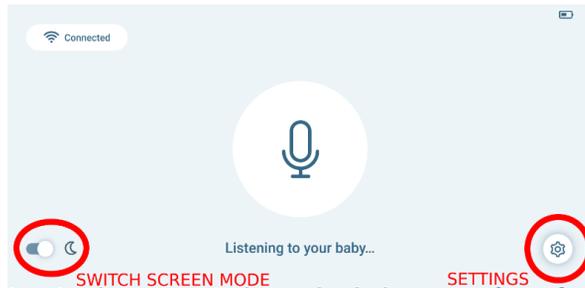

- La esquina superior izquierda muestra el **estado de la conexión wifi**, mientras que la superior derecha muestra el nivel de batería.
- Las esquinas inferiores contienen iconos de utilidades, como la posibilidad de cambiar entre modo normal y oscuro, y el acceso al **menú de ajustes (Settings Menu)**.



Conéctate a Wi-Fi para que el dispositivo funcione, indicado por el icono de micrófono apagado y el icono de no-wifi. 



LISTENING TO YOUR BABY: BabyT escucha activamente los llantos del bebé.




CHECKING AUDIO: cuando el dispositivo detecta un posible llanto del bebé, verificará si se trata de un llanto verdadero.

TRANSLATION: ¡Allá vamos! La comprobación de sonido se ha completado y BabyT ha detectado un llanto y ahora avanza a la siguiente fase.

TRANSLATE: El aparato determina a cuál de las cinco necesidades corresponde (consulta el prospecto). Puede tardar unos segundos o un poco más, dependiendo de la claridad del llanto.

Settings

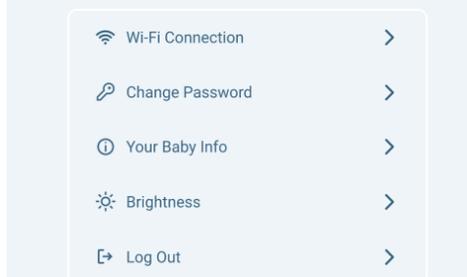

El **Settings Menu** ofrece varias opciones.

Nota: La opción **"Your Baby Info"** te permite actualizar la **fecha de nacimiento y el sexo** de tu bebé en cualquier momento.

Esta información es crucial para nuestra investigación, así que **asegúrate de que siempre es exacta** y actualizada.

Jessie feels uncomfortable

Choose correct result: 

- Jessie is hungry
- Jessie is sleepy
- Jessie needs to burp
- Jessie is irritated
- Jessie feels uncomfortable
- Not a cry

¡Por favor, comparte tus comentarios!

Las traducciones aparecerán en la pantalla durante aproximadamente 2 minutos. Durante este tiempo, puedes indicar si crees que la traducción es correcta pulsando el botón "positivo" o "negativo", y proporcionar la traducción correcta si la conoces.

Tu aportación es CRUCIAL para nuestros esfuerzos.